

KIATO Plus® Sicherheits-Skalpelle wurden entwickelt, um das Risiko von Stich- und Schnittverletzungen zu reduzieren, die vor dem Gebrauch, beim Weiterreichen, nach dem Gebrauch sowie bei der Entsorgung auftreten können.

Das Skalpell verfügt über eine zurückziehbare Sicherheits-Schutzkappe, eine einhändige Bedienung für Rechts- und Linkshänder sowie einen permanenten Entsorgungs-Sperrknopf, der ein erneutes Freilegen der Klinge nach dem Gebrauch verhindert. Ein akustisches und taktiles Feedback bestätigt die korrekte Aktivierung in jeder Phase und unterstützt so eine sichere Handhabung in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.


KIATO Plus® Sicherheits-Skalpelle unterstützen Gesundheitseinrichtungen bei der Einhaltung der **EU-Richtlinie 2010/32/EU** zur Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze medizinische Instrumente.

1. Versand- / Übergabeposition:



Die Sicherheitskappe bedeckt die Klinge vollständig. Die Kappe bleibt verriegelt und kann ohne Aktivierung nicht zurückgezogen werden, wodurch ein sicherer Schutz während Transport und Übergabe gewährleistet ist.

2. Gebrauchsposition:

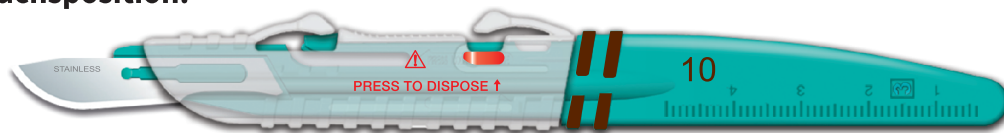


Die Klinge ist freigelegt und einsatzbereit. Ein hörbares Klickgeräusch bestätigt, dass die Schutzkappe vollständig zurückgezogen und in der Gebrauchsposition sicher verriegelt ist.

Gebrauchsanweisung


Zur Verwendung

- Den Entriegelungsknopf am Griff drücken
- Die Sicherheitskappe vollständig zurückziehen
- Auf das hörbare Klickgeräusch achten, das bestätigt, dass die Klinge in der GEBRAUCH Position verriegelt ist

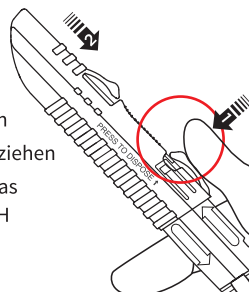


Zum Weiterreichen

- Den Entriegelungsknopf drücken
- Die Sicherheitskappe nach vorne in die Übergabeposition schieben
- Die Kappe verriegelt sicher in der ÜBERGABEPOSITION

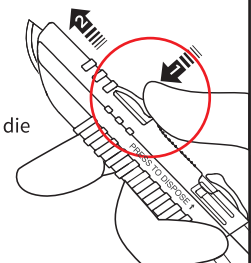

Zum Entsorgen

- Die Schutzkappe in die Übergabeposition schieben
- Den permanenten Entsorgungs-Sperrknopf nach innen drücken, bis ein Klick hörbar ist
- In einem zugelassenen Abwurfbehälter für scharfe/spitze Gegenstände entsorgen

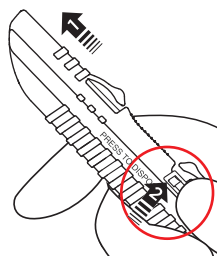

Schritt 1

- Nach Aktivierung des permanenten Entsorgungs-Sperrknopfes kann die Klinge nicht erneut freigelegt werden.

In einem zugelassenen Abwurfbehälter für scharfe/spitze Gegenstände entsorgen.



Schritt 2

Wichtige Sicherheitsmerkmale und Vorteile

- **Permanenter Entsorgungs-Verriegelungsknopf**
Aktivierung kann die Klinge nicht erneut freigelegt werden
- **Zurückziehbare Sicherheits**
Schutzhülle – Bedeckt die Klinge vor, während und nach dem Gebrauch
- **Einhändige, beidhändige Ausführung**
Die Verwendung, Weitergabe und Entsorgung kann von Rechts- und Linkshändern gleichermaßen problemlos durchgeführt werden.
- **Akustische Verriegelungsbestätigung**
Das Klicken bestätigt die sichere Positionierung.
- **Hochwertige Edelstahlklinge**
– gleichbleibende Schärfe und Schneidleistung
- **Farblich gekennzeichnete Griff mit aufgedruckter Größe**
Schnelle Identifizierung in klinischen Umgebungen

KIATO Plus® Sicherheits-Skalpelle sind in gängigen chirurgischen Klingengrößen erhältlich und eignen sich für ein breites Spektrum an Eingriffen.

FITMENT 3


Size	Reorder no
10	12910
11	12911
11P	12931
12	12912
12D	12925
13	12913
15	12915
15C	12926

FITMENT 4

Size	Reorder no
18	12927
19	12919
20	12920
21	12921
22	12922
23	12923
24	12924
25	12928



Patentnummer: 7.097.087

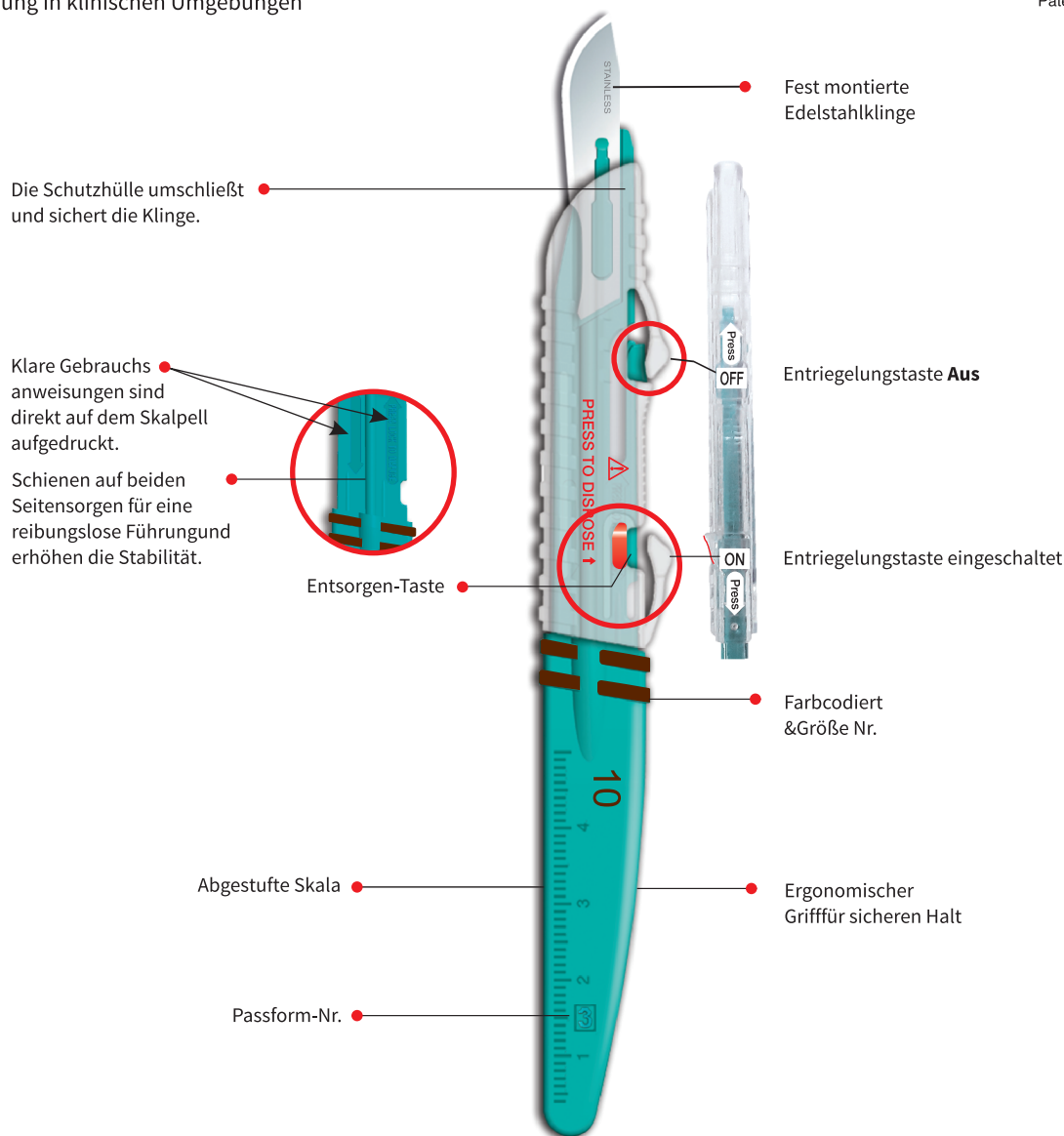

The smart choice for sharp blades

A subsidiary of Kehr Surgical Pvt. Ltd.

Aditya Dispomed Products Pvt. Ltd.
Plot No. 19 Sector 6 IMT Manesar
Gurgaon Haryana 122050 India
Tel. +91 124 47 64 904

sales@adityadisposed.com
www.adityadisposed.com

EU REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

CH REP
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

Regulierung und Compliance

- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt
- Klassifiziert als Medizinprodukt gemäß EU-MDR
- Entwickelt zur Unterstützung der Einhaltung der EU-Richtlinie 2010/32/EU



Scannen Sie den Code, um detaillierte Produktinformationen und eine Anwendungsdemonstration anzuzeigen.