

I bisturi di sicurezza **KIATO Plus®** sono progettati per contribuire a ridurre il rischio di lesioni da taglienti che possono verificarsi prima dell'uso, durante il passaggio, dopo l'uso e durante lo smaltimento.

Il bisturi è dotato di una guaina di sicurezza retrattile, di un funzionamento ambidestro con una sola mano e di un **Pulsante di Smaltimento con Blocco Permanente** che impedisce la riesposizione della lama dopo l'uso. Il feedback acustico e tattile conferma la corretta attivazione in ogni fase, favorendo una gestione sicura in ambienti clinici ad alta intensità.


KIATO Plus® aiuta le strutture sanitarie a conformarsi alla **Direttiva Europea 2010/32/UE** sulla prevenzione delle ferite da taglienti nel settore ospedaliero e sanitario.

1. Posizione di Trasporto / Passaggio



La guaina di sicurezza copre completamente la lama. La guaina rimane bloccata e non può essere retratta senza attivazione, garantendo protezione durante il trasporto e il passaggio.

2. Posizione di Utilizzo

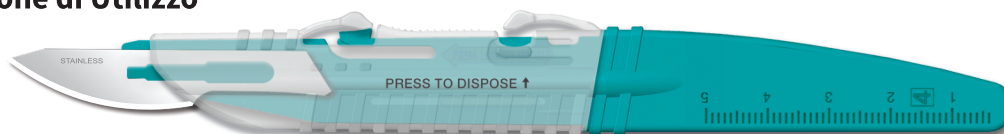


La lama è esposta e pronta per l'uso. Un clic udibile conferma che la guaina è completamente retratta e bloccata in posizione di UTILIZZO.

Istruzioni per l'Uso


Per l'Utilizzo

- Premere il pulsante di rilascio sull'impugnatura
- Retrarre completamente la guaina di sicurezza
- Ascoltare il clic udibile che conferma il blocco della lama in posizione di UTILIZZO

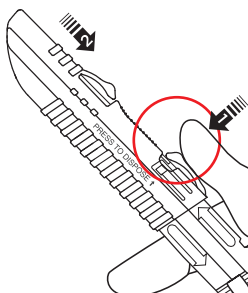


Per il Passaggio

- Premere il pulsante di rilascio
- Far scorrere la guaina di sicurezza in avanti fino alla posizione iniziale
- La guaina si blocca saldamente in posizione di PASSAGGIO

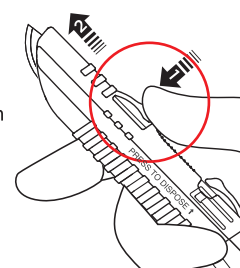

Per lo Smaltimento


- Far scorrere la guaina in posizione di PASSAGGIO
- Premere il Pulsante di Smaltimento con Blocco Permanente fino allo scatto
- Smaltire immediatamente in un contenitore per taglienti approvato

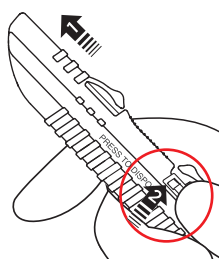

Step 1

Una volta attivato il Pulsante di Smaltimento con Blocco Permanente, la lama non può essere riesposta.

Smaltire in un apposito contenitore per oggetti taglienti.

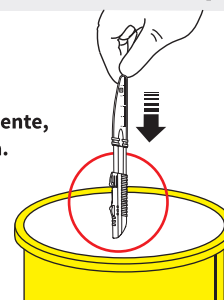

Step 2

Principali Caratteristiche di Sicurezza e Vantaggi


- **Pulsante di Smaltimento con Blocco Permanente**
Una volta attivato, la lama non può essere riesposta
- **Guaina di Sicurezza Retrattile**
Copre la lama prima dell'uso, durante il passaggio e dopo l'uso
- **Design Ambidestro a Una Mano**
Utilizzo, passaggio e smaltimento possono essere eseguiti con una sola mano da utenti destrorsi e mancini
- **Conferma di Blocco Acustica**
Il clic conferma il corretto posizionamento
- **Lama in Acciaio Inox di Alta Qualità**
Affilatura costante e prestazioni di taglio affidabili

KIATO Plus® è disponibile nelle misure di lama chirurgica più comunemente utilizzate per adattarsi a un'ampia gamma di procedure.

FITMENT 3		FITMENT 4	
Size	Reorder no	Size	Reorder no
10	13010	18	13027
11	13011	19	13019
11P	13031	20	13020
12	13012	21	13021
12D	13025	22	13022
13	13013	23	13023
15	13015	24	13024
15C	13026	25	13028



Brevetto n.: 7,097,087

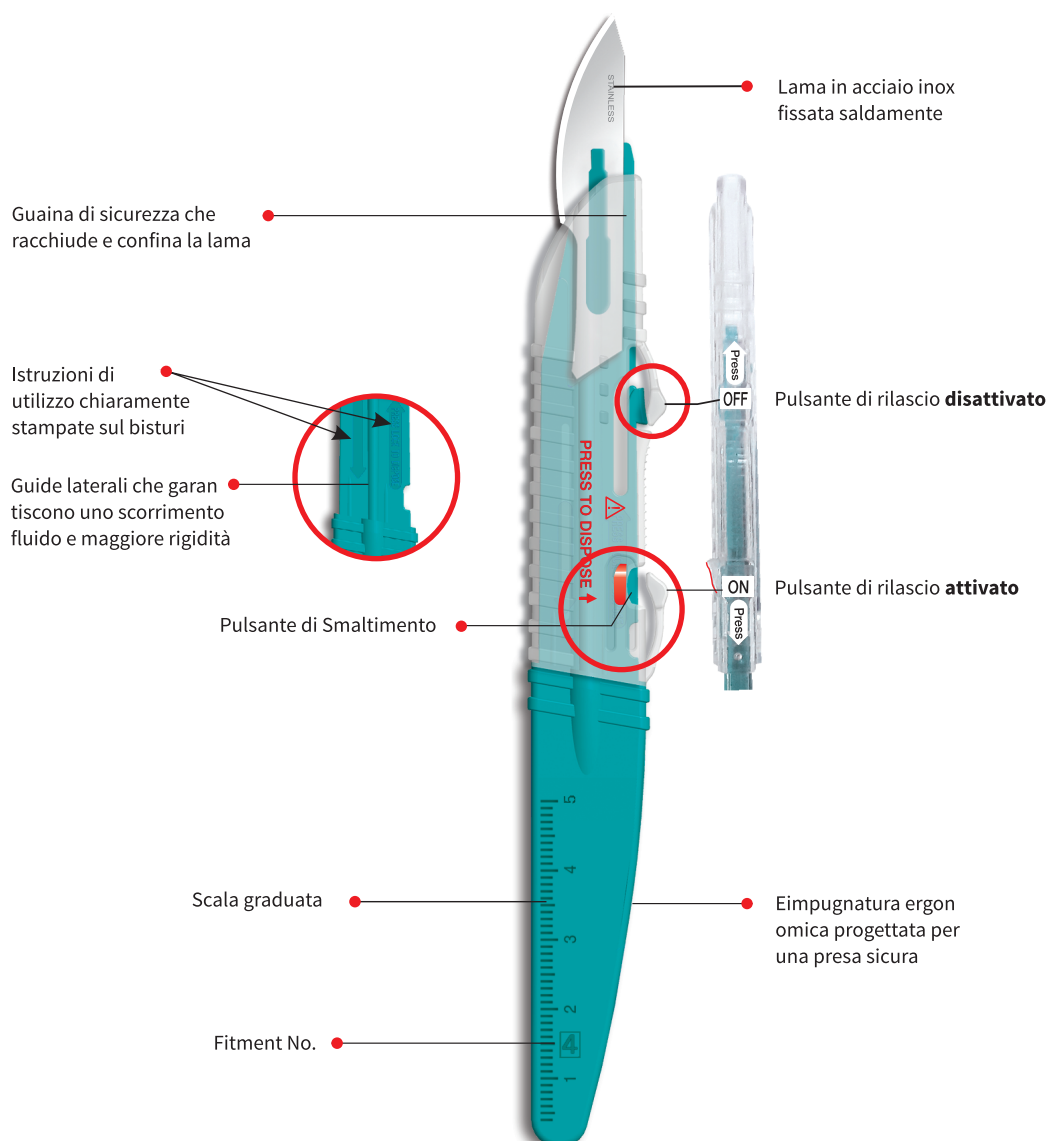

The smart choice for sharp blades

Aditya Disposed Products Pvt. Ltd.
Plot No. 19 Sector 6 IMT Manesar
Gurgaon Haryana 122050 India
Tel. +91 124 47 64 904

sales@adityadisposed.com
www.adityadisposed.com

EU REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

CH REP
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

Regolamentazione e Conformità

- Dispositivo medico marcato CE
- Classificato come MD ai sensi del Regolamento UE sui Dispositivi Medici (MDR)
- Progettato per supportare la conformità alla Direttiva UE 2010/32/UE



Informazioni sul prodotto e video dimostrativo