

Los bisturíes de seguridad **KIATO Plus®** están diseñados para ayudar a reducir el riesgo de lesiones por objetos punzocortantes antes del uso, durante el pase, después del uso y durante la eliminación.

El bisturí **KIATO Plus®** incorpora una funda de seguridad retráctil, un funcionamiento ambidiestro con una sola mano y un **Botón de Eliminación con Bloqueo Permanente** que impide la reexposición de la hoja después del uso. La confirmación acústica y táctil confirma la correcta activación en cada etapa, lo que favorece una manipulación segura en entornos clínicos exigentes.

KIATO Plus® ayuda a los centros sanitarios a cumplir con la **Directiva Europea 2010/32/UE** sobre la prevención de lesiones por objetos punzocortantes en el sector hospitalario y sanitario.

1. Posición de Transporte / Pase



La funda de seguridad cubre completamente la hoja. La funda permanece bloqueada y no puede retraerse sin activación, garantizando protección durante el transporte y el pase.

2. Posición de Uso




La hoja queda expuesta y lista para su uso. Un clic audible confirma que la funda está completamente retraída y bloqueada en la posición de USO.

Instrucciones de Uso


Para Usar

- Presione el botón de liberación en el mango
- Retraiga completamente la funda de seguridad
- Escuche el clic audible que confirma que la hoja está bloqueada en la posición de USO

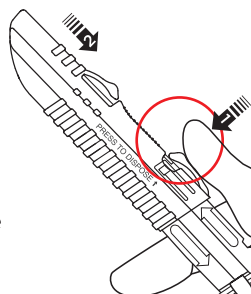


Para Pasar

- Presione el botón de liberación
- Deslice la funda de seguridad hacia adelante hasta la posición inicial
- La funda se bloquea firmemente en la posición de PASE

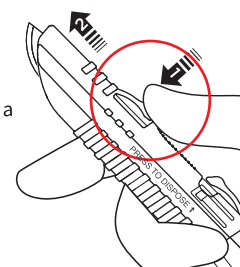

Para Eliminar


- Deslice la funda a la posición de PASE
- Presione el Botón de Eliminación con Bloqueo Permanente hasta que haga clic
- Elimine inmediatamente en un contenedor homologado para objetos punzocortantes

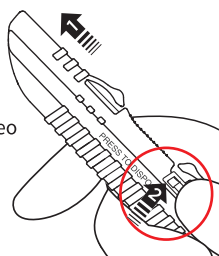

Step 1

Una vez activado el Botón de Eliminación con Bloqueo Permanente, la hoja no puede volver a exponerse.

Desear en un contenedor homologado para objetos punzocortantes.

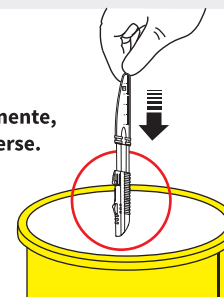

Step 2

KIATO⁺ PLUS STERILE SAFETY SCALPEL
with Retractable Sheath Stainless Steel Blade

Contents Sterile in unopened, undamaged package.

Pat. No. 7.087.067

AF-314/5



Aditya Disposed Products Pvt. Ltd
Plot No. 19 Sector 6 I.M.T. Manesar
Gurgaon Haryana 122 050 India
www.adityadisposed.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

CE 2 4 6 0

26-06-15
LOT D01045
31-05-31

0122002000120117
171 30-04-15
171 31-05-31
170 001045

PEEL AWAY TO OPEN

Principales Características de Seguridad y Beneficios


- **Botón de Eliminación con Bloqueo Permanente**
Una vez activado, la hoja no puede volver a exponerse
- **Funda de Seguridad Retráctil**
Cubre la hoja antes del uso, durante el pase y después del uso
- **Diseño Ambidiestro de Una Sola Mano**
El uso, el pase y la eliminación pueden realizarse con una sola mano por usuarios diestros y zurdos
- **Confirmación Audible de Bloqueo**
El clic confirma el posicionamiento seguro
- **Hoja de acero inoxidable de alta calidad**
Afilado constante y rendimiento de corte fiable
- **Mango Codificado por Color con Tamaño Impreso**
Identificación rápida en entornos clínicos

KIATO Plus® está disponible en los tamaños de hojas quirúrgicas más utilizados para adaptarse a una amplia gama de procedimientos.

FITMENT 3		FITMENT 4	
Size	Reorder no	Size	Reorder no
10	12910	18	12927
11	12911	19	12919
11P	12931	20	12920
12	12912	21	12921
12D	12925	22	12922
13	12913	23	12923
15	12915	24	12924
15C	12926	25	12928



Patente n.º: 7,097,087

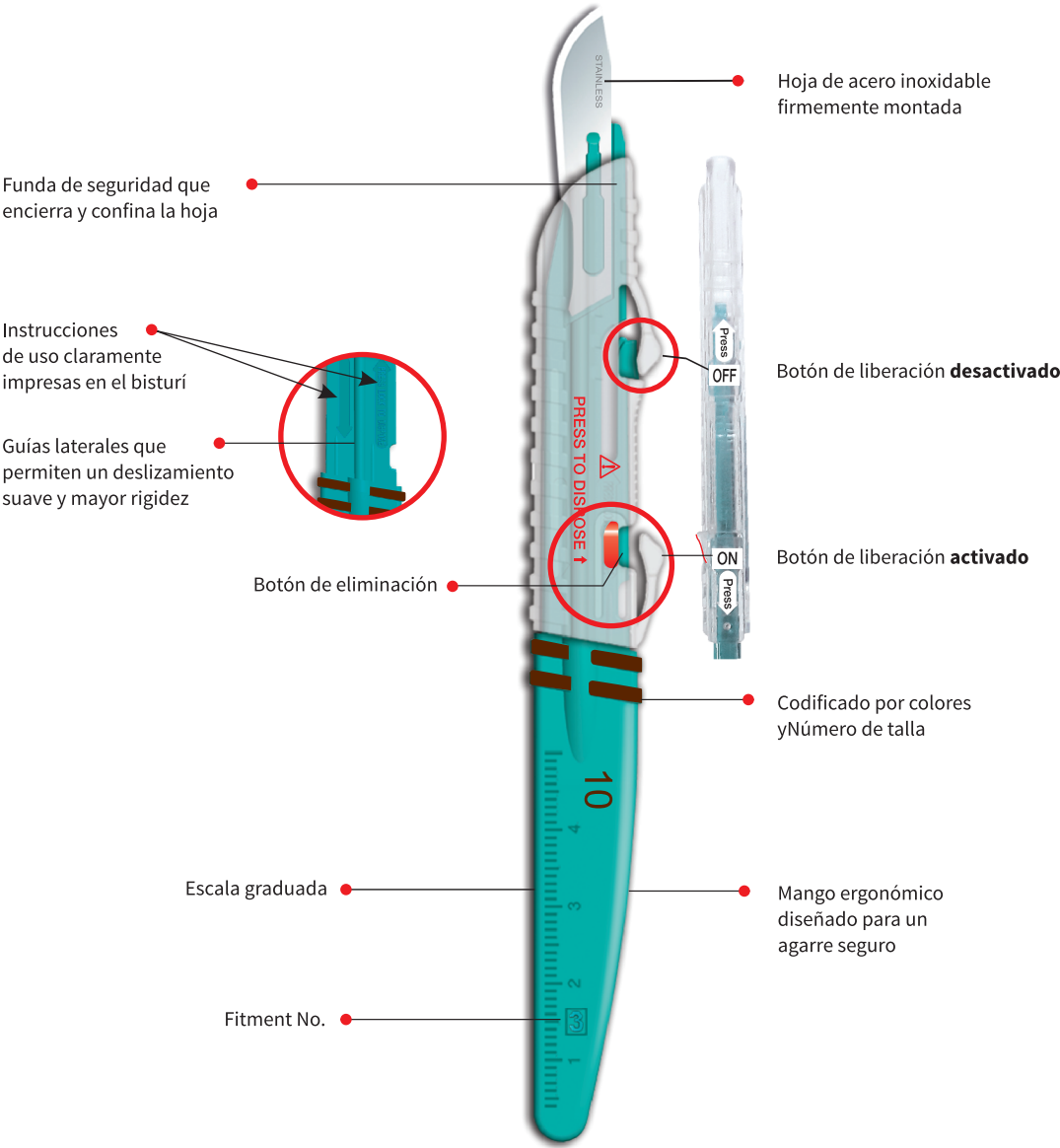

The smart choice for sharp blades

A subsidiary of Kehr Surgical Pvt. Ltd.

Aditya Dispomed Products Pvt. Ltd.
Plot No. 19 Sector 6 IMT Manesar
Gurgaon Haryana 122050 India
Tel. +91 124 47 64 904
sales@adityadisposed.com
www.adityadisposed.com

EU REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

CH REP
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

Reglamentación y Cumplimiento

- Dispositivo médico con marcado CE
- Clasificado como MD conforme al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)
- Diseñado para apoyar el cumplimiento de la Directiva UE 2010/32/UE



Escanee para ver información detallada del producto y un video demostrativo.